

EverGo -Kurzanleitung



Schritt 2

1. Befestigen Sie den Tragegriff und den Schulterriemen an der Tragetasche.

2. Setzen Sie die Batterien ein.

Zum Einsetzen der Batterien müssen Sie den Reißverschluss des Deckels der Tasche öffnen und den Deckel aufklappen, das Oberteil anheben und die Abdeckung öffnen.

Ziehen Sie einen der beiden kleinen grauen Hebel am Batteriefach oben auf dem EverGo zurück und setzen Sie vorsichtig eine Batterie ein, wobei das Respirationics-Etikett zur Geräteinnenseite zeigen muss. Die Haltevorrichtung schnappt über der Batterie ein. Setzen Sie die zweite Batterie durch Wiederholung desselben Verfahrens ein. Schließen Sie den Reißverschluss der Tasche.

Wichtig: Wenn eine der Batterien über die graue Oberfläche hervorsteht, ist sie möglicherweise verkehrt eingesetzt. Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie richtig ein.



Schritt 3

3. Stellen Sie Ihren EverGo an einem gut belüfteten Ort auf; der Staubfilter ist in das kleine Netzabteil mit Reißverschluss einzusetzen.

4. Laden Sie die Batterien mit Hilfe des Netzkabels auf.

Verbinden Sie zunächst das Netzkabel mit dem Netzteil. Verbinden Sie dann das Ausgangskabel des Netzteils mit dem Stromeingang auf der Seite des EverGo-Geräts. Stecken Sie dann das Netzkabel in eine Steckdose ein.

Wichtig: Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen, müssen die Batterien des EverGo mit dem Netzkabel vollständig aufgeladen werden (mindestens 4 h). Verwenden Sie das Gerät nicht im Batteriebetrieb bevor es nicht vollständig aufgeladen ist.



Schritt 4

5. Verbinden Sie eine Nasenkanüle mit dem Sauerstoffanschluss. Der Anschluß für die Nasenkanüle befindet sich oben auf dem Gerät.



Schritt 5

6. Schalten Sie Ihren EverGo ein.

Berühren Sie den Bildschirm vorsichtig an einer beliebigen Stelle. Berühren Sie dann innerhalb von 5 Sekunden das Ein/Aus-Symbol I/O; andernfalls schaltet sich der Bildschirm ab.

Siehe Rückseite bezüglich weiterer Schritte und Informationen.



Schritt 7

7. Stellen Sie den Flow ein.

Berühren Sie die große Nummer in der Bildschirmmitte (hier ist Einstellung 2 gezeigt). Stellen Sie die von Ihrem Arzt vorgeschriebene Sauerstoffmenge mit Hilfe der Nach-Oben- bzw. Nach-Unten-Pfeiltasten ein.

8. Legen Sie die Nasenkanüle an und atmen Sie normal durch Ihre Nase.

EverGo-Batterielebensdauer

Die folgende Tabelle zeigt die ungefähre Batterielebensdauer bei 20 Atemzügen pro Minute an. Die angegebenen Zeiten können je nach Aktivitätsniveau und Batteriezustand variieren.

Flow-Einstellung	20 Atemzüge pro Minute (2 Batterien)	20 Atemzüge pro Minute (1 Batterie)
1	12 Stunden	6 Stunden
2	8 Stunden	4 Stunden
3	6 Stunden	3 Stunden
4	4 Stunden	2 Stunden
5	4 Stunden	2 Stunden
6	4 Stunden	2 Stunden

Betrieb des EverGo-Trolleys



Zur Einrichtung und Verwendung des Trolleys die folgenden Schritte durchführen:

1. Stellen Sie den Trolley auf einer ebenen Oberfläche auf, halten Sie den Griff mit einer Hand fest und klappen Sie die Bodenunterlage aus.
2. Ziehen Sie das Gummiband auf der Rückseite der Tragetasche zurück und streifen Sie es über den Griff des Trolleys. Schieben Sie dann die Zubehörtasche über den Griff des Trolleys.
3. Drücken Sie auf den Knopf „PUSH“ im Oberteil des Griffs. Ziehen Sie dann den Griff nach oben, um den Arm des Trolleys auf die gewünschte Höhe einzustellen.
4. Der Trolley ist jetzt zum Transport Ihres Sauerstoffkonzentrators und der Zubehörtasche einsatzbereit.



Respironics, Inc.: +1-724-387-4000
Respironics Europa, Afrika, Naher Osten: +33-1-47-52-30-00
Respironics Deutschland: +49-8152-93-06-0
Respironics Frankreich: +33-2-51-89-36-00
Respironics Italien: +39-03-62-63-43-1
Respironics Großbritannien: +44-800-1300-845
Respironics Schweiz: +41-62-745-1750
Respironics Asien/Pazifik: +852-3194-2280
Respironics Australien: +61-2-9666-4444
www.respironics.eu
www.respironics.com

VORSICHT: Laut US-Bundesgesetz dürfen diese Geräte nur von einem Arzt bzw. auf ärztliche Anordnung verkauft werden.

Respironics ist eine eingetragene Marke und EverGo und Freedom Series sind Marken des Unternehmens Respironics, Inc. und seiner Tochterunternehmen. Geschützt von einem bzw. mehreren Patenten. Weitere Patente angemeldet.

©2008 Respironics, Inc. und Tochterunternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Broudy CY 01/18/08 MCI 4101491 PN 1050143