

besser **SCHLAFEN**
besser **LEBEN**

Installationsanleitung Schwebstofffilter

Deutsch

Mehr Lebensqualität
mit FLO Therapiegeräten

OXYCARE GmbH
Sauerstoff-Beatmungstechnik
Fon 04 21-48 99 6-6 Fax 04 21 - 48 99 6-99
www.oxycaire.eu

März 2013



Name und Anschrift des Herstellers



Gebrauchsanweisung beachten



Artikelnummer und Artikelbezeichnung



Achtung! Warnhinweise in der
Bedienungsanleitung beachten!

Kennzeichnungen

Filtertest:

Das FLO Gerät fordert Sie in regelmäßigen Abständen auf, einen Filtertest durchzuführen. Hierzu erscheint eine entsprechende Meldung am Gerät.

Zur Durchführung des Filtertest, entfernen Sie zunächst das komplette Zubehör vom Luftbefeuchter.

Der Filtertest kann jetzt durch die entsprechende Taste am Gerät gestartet werden (ziehen Sie hierzu bitte die Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Gerätes hinzu).

Anschließend zeigt das Gerät den Zustand des Filters an. Folgende Meldungen sind hierbei möglich:

- Filterleistung in Ordnung
- Filterwechsel erforderlich C11

Ist ein Filterwechsel erforderlich, so sollte dieser in der nächsten Zeit durchgeführt werden.

Es ist eine entsprechende Reservezeit vorhanden, die u.U. auch noch einige Wochen (z.B. Urlaub) betragen kann.

Filterwechsel:



Für einen Filterwechsel, nehmen Sie eine Münze oder einen ähnlichen schmalen Gegenstand.

Stecken Sie den Gegenstand in den Filterkassettenverschluss.



Drehen Sie den Filterkassettenverschluss in eine senkrechte Stellung.



Anschließend ziehen Sie den Verschluss aus der Öffnung



und heben die Filterkassette vom Gerät ab.

Filtertest und Filterwechsel

Tauschen Sie diese gegen eine neue Filterkassette aus.
Achten Sie dabei auf den korrekten Sitz der Filterkassette.
Verschließen Sie die Filterkassette mit dem vorgesehenen
Filterkassettenverschluss in umgekehrter Reihenfolge.



Achtung!

- Es dürfen nur zugelassene Filter verwendet werden!
- Eine Wiederaufbereitung der Filterkassette ist nicht möglich!
- Entsorgen Sie die alte Filterkassette über den Hausmüll!

OXYCARE
Sauerstoff-Beatmungstechnik

Fon 04 21 - 48 99 6-6 Fax 04 21 - 48 99 6-99

www.oxycaire.eu



FLO Medizintechnik GmbH
Westhoyeler Str. 25
D-49328 Melle
Germany

fon. +49 5226 - 98 30 47
fax. +49 5226 - 98 78 75

info@flo-medizintechnik.de
www.flo-medizintechnik.de

OXYCARE GmbH
Sauerstoff-Beatmungstechnik
Fon 04 21 - 48 99 6-6 Fax 04 21 - 48 99 6-99
www.oxycare.eu