



88 % der Patienten fanden die AirFit N20 komfortabler als die bisher marktführende Nasenmaske.<sup>1</sup>

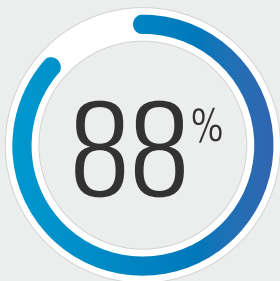


Ein Maskenkissen. Viele technologische Verbesserungen bei Komfort und Stabilität.

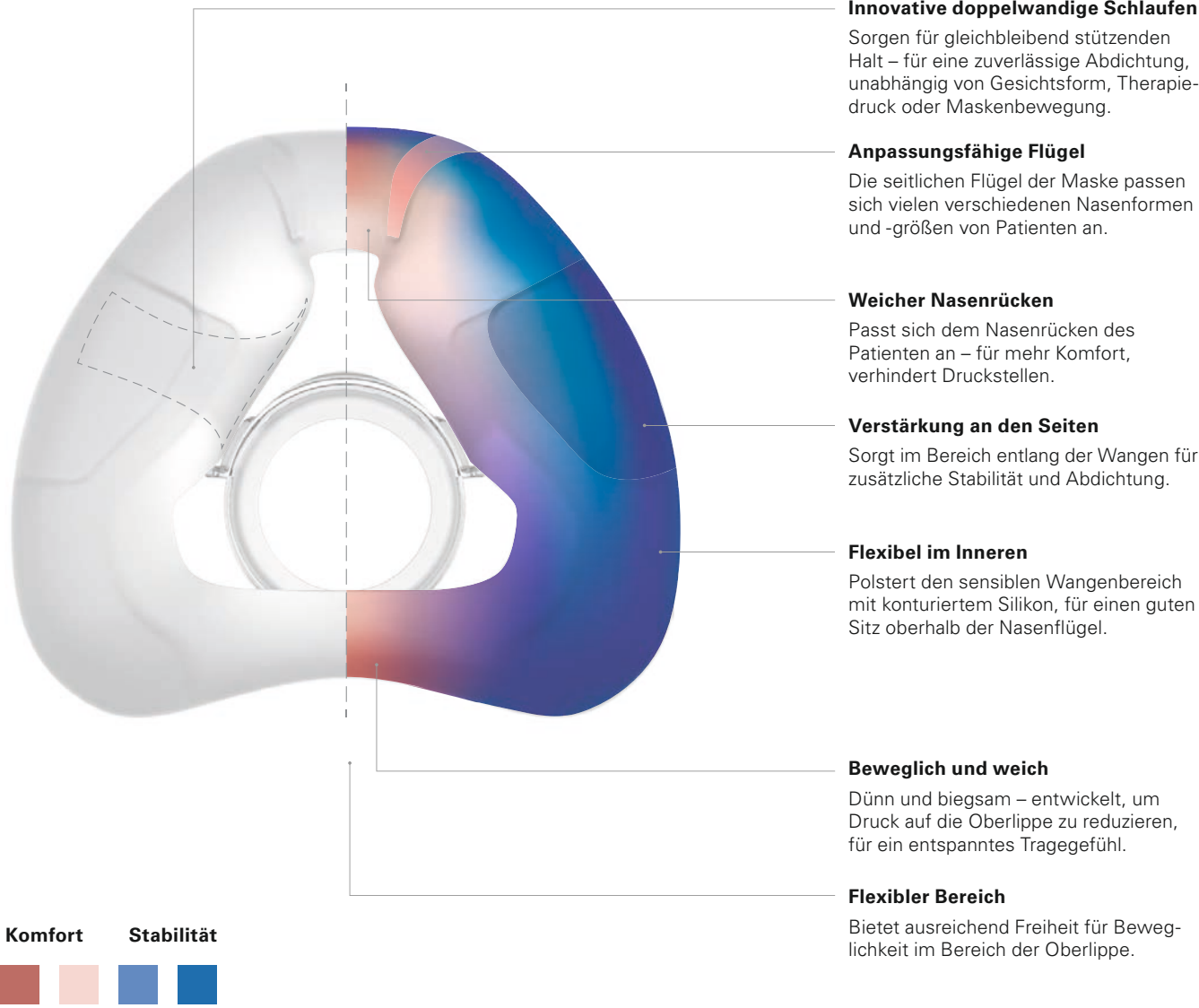

### Anleitung zum Anlegen der AirFit N20 Compact



- Stellen Sie zuerst sicher, dass die Magneten an den unteren Bändern von den Clips gelöst sind.
- Wenn sie nicht gelöst sind, ziehen Sie sie mit einer Drehbewegung vom Rahmen ab.
- Ziehen Sie das Kopfband über den Kopf. Achten Sie darauf, dass das ResMed-Logo dabei nach außen zeigt.

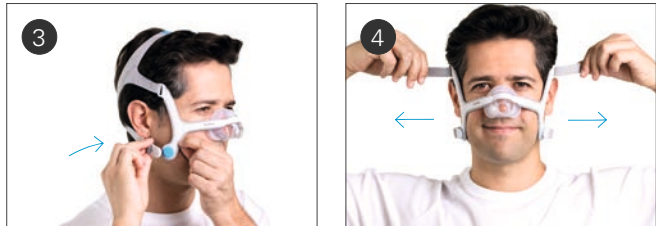

- Positionieren Sie die unteren Bänder so, dass sie unterhalb der Ohren verlaufen.
- Verbinden Sie die Magneten mit dem jeweiligen Clip auf dem Rahmen.
- Passen Sie die Verschlüsse auf den oberen Bändern so an, dass die Maske gerade und stabil sitzt.
- Befestigen Sie die Verschluss-laschen wieder.



- Wiederholen Sie Schritt 4 mit den unteren Bändern.
- Verbinden Sie den Luftschlauch des Therapiegeräts mit dem Kniestück, führen Sie dann das Kniestück in den Anschluss an der Maskenvorderseite ein, sodass es mit einem Klicken einrastet.
- Schalten Sie das Therapiegerät ein.

Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.



### und der AirFit N20 Classic



- Die unteren Kopfänder sind beim Anlegen zunächst vom Masken-rahmen gelöst.
- Achten Sie darauf, dass das Masken- logo nach unten zeigt.
- Halten Sie die Maske ans Gesicht und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.



- Führen Sie die unteren Bänder unter Ihre Ohren und befestigen Sie sie an den Haken am Maskenrahmen.
- Passen Sie die Klettverschlüsse auf den oberen Bändern an, bis die Maske gerade und stabil sitzt. Ziehen Sie die Bänder nicht zu straff an.
- Befestigen Sie die Klettverschluss-laschen wieder.



- Wiederholen Sie Schritt 4 mit den unteren Bändern.
- Befestigen Sie die Verschluss-laschen wieder.
- Schließen Sie den Luftschlauch des Geräts am Kniestück an und lassen Sie dann das Kniestück mit einem Klick in die Maske einrasten.
- Schalten Sie das Therapiegerät ein.

### Zusätzliche Optionen

- Das Kopfband ist so gestaltet, dass verschiedene Frisuren getragen werden können.



## Kompakte und klassische Nasenmasken, die einfach passen

Jedes Gesicht ist anders. Mit unseren neuen Nasenmasken AirFit™ N20 und AirFit N20 Classic können dennoch viele Patienten schnell und unkompliziert mit einer passenden Maske versorgt werden.

Patienten, die besonderen Wert auf freie Sicht legen, werden die kompakte Version wählen, während Patienten, die klassische Masken bevorzugen, die Freiheit und Flexibilität des neuen anpassungsfähigen Maskenrahmens schätzen werden.



### Design, das für jeden passt

Jede AirFit-Maske hat ein InfinitySeal™ Maskenkissen aus Silikon, das unabhängig von Gesichtsform und -größe für eine zuverlässige Abdichtung sorgt.

### Weich und anschmiegsam


Sowohl die klassischen als auch die kompakten Masken schonen die Haut. Maskenkissen und Kopfband sind weich und anschmiegsam, sodass die Therapie für Ihre Patienten spürbar komfortabler wird.

### Frei kombinierbar


AirFit N20 und AirFit N20 Classic verwenden das gleiche Maskenkissen. Das sorgt für mehr Effizienz und Flexibilität – denn Sie als Versorger müssen weniger Produkte verwalten und Ihre Patienten haben dennoch mehr Optionen zur Wahl.

Vertrieb durch: ResMed Deutschland GmbH, Haferwende 40, 28357 Bremen, Tel 0421 48993-0, Fax 0421 48993-10, E-Mail info@resmed-deutschland.de.  
AirFit und InfinitySeal sind Marken und/oder eingetragene Marken der ResMed Unternehmensgruppe.  
© 2019 ResMed. Art.-Nr. 10110326/2 (auf Grundlage von 10110295/1 2017-07), Obj.-ID. C243079 - 2 - 01 19

92 % der Patienten fanden AirFit N20 angenehmer zu tragen als ihre derzeit verwendete Nasenmaske.<sup>1</sup>

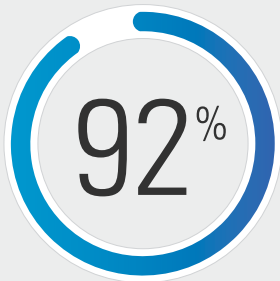

In einer internationalen Studie passte die AirFit N20 99,4 % aller Patienten.<sup>2</sup>

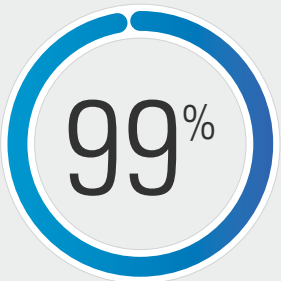

AirFit™ N20



Freies Blickfeld

Der Rahmen verläuft unterhalb der Augen und sorgt für Stabilität bei gleichzeitig wenig Gesichtskontakt – das bedeutet mehr Bewegungs- und Sichtfreiheit für Ihre Patienten.

Freie Beweglichkeit

Ein kurzer, flexibler Verbindungsschlauch ermöglicht den Patienten freie Bewegungen und verhindert Zug auf den Schlauch sowie Leckagen.



Weich und geschmeidig

Kopfband aus besonders weichem Textilgewebe passt sich verschiedenen Kopfformen und -größen an.

Gepolsterter Rahmen

Der Rahmen ist auf der Innenseite gepolstert, sodass er an jedem Kontaktpunkt mit dem Gesicht angenehm weich aufliegt.

Klassische Stirnstütze

Die mit dem flexiblen Maskenrahmen verbundene Stirnstütze wirkt stabilisierend und gleicht den Maskensitz der Bewegung an.

Zuverlässige Abdichtung

Das spezielle Design des Maskenkissens vermeidet Leckagen, toleriert ungenaues Anlegen und dichtet auch bei variablen Drücken gut ab.

Schnelles Anlegen

Die magnetischen Clips ermöglichen ein sekunden-schnelles An- und Ablegen der Maske.



AirFit™ N20 CLASSIC



Schnellverschluss


Dank Schnellverschluss ist das Kniestück einfach anzuschließen und abzunehmen, sodass nächtliches Aufstehen problemlos möglich ist.

Einfache Anpassung

Die tägliche Handhabung ist äußerst unkompliziert: Die Kopfbänder werden mithilfe klassischer Klettverschlüsse justiert und zum Befestigen einfach in den Maskenrahmen eingehakt.

Tipps zur Größenbestimmung

Die Maskenkissen der AirFit N20 und der AirFit N20 Classic sind in drei verschiedenen Größen erhältlich – Small, Medium und Large. Durch das modulare Design der AirFit N20 Masken lässt sich jede Kissengröße leicht in demselben Maskenrahmen befestigen. Ein schneller Wechsel ist ganz unkompliziert möglich. Um die am besten geeignete Größe für Ihre Patienten zu bestimmen, wird die Verwendung der Anpass-Schablone empfohlen. Die Schablone steht unter ResMed.com/AirFit20 zur Verfügung.

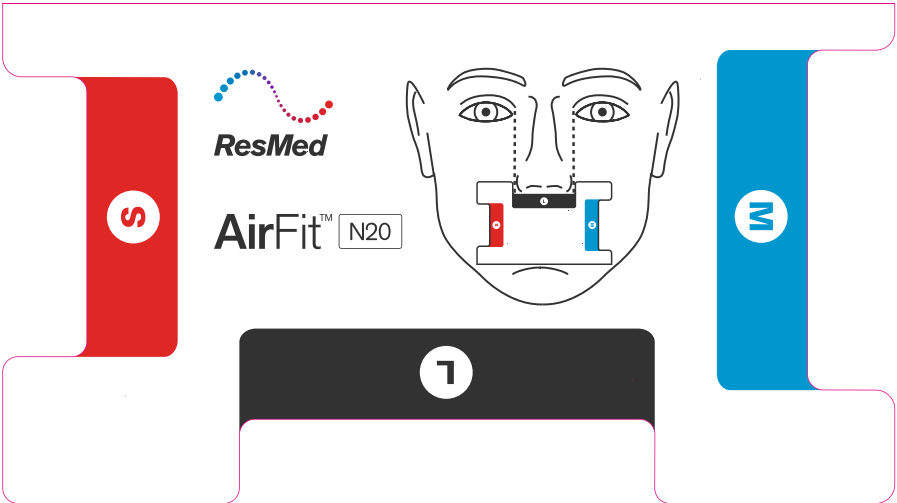


Artikelnummern

AirFit N20

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| AirFit N20 for Her: Small | 63510 |
| AirFit N20: Small         | 63509 |
| AirFit N20: Medium        | 63511 |
| AirFit N20: Large         | 63512 |


AirFit N20 Classic

|                    |       |
|--------------------|-------|
| AirFit N20: Small  | 63710 |
| AirFit N20: Medium | 63711 |
| AirFit N20: Large  | 63712 |

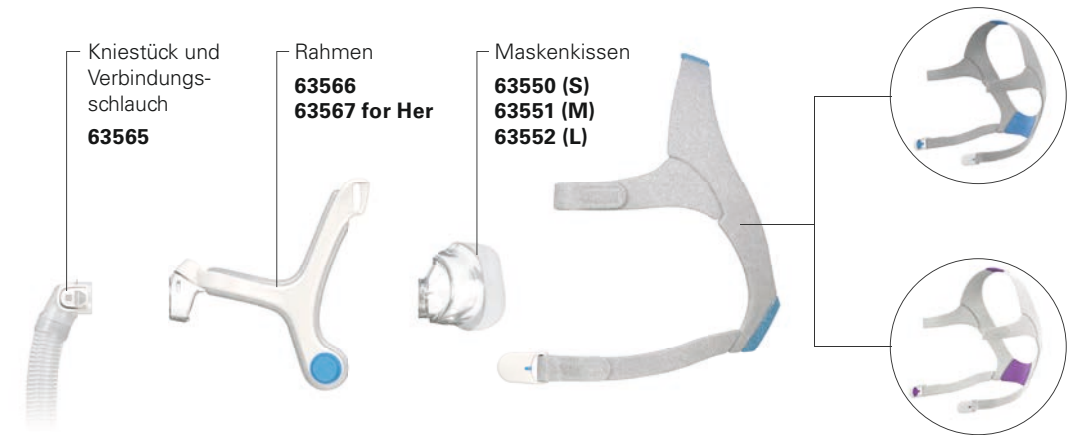

AirFit N20 Kopfband  
63560 (S)  
63561 (STD)  
63562 (L)

AirFit N20 for Her Kopfband  
63558

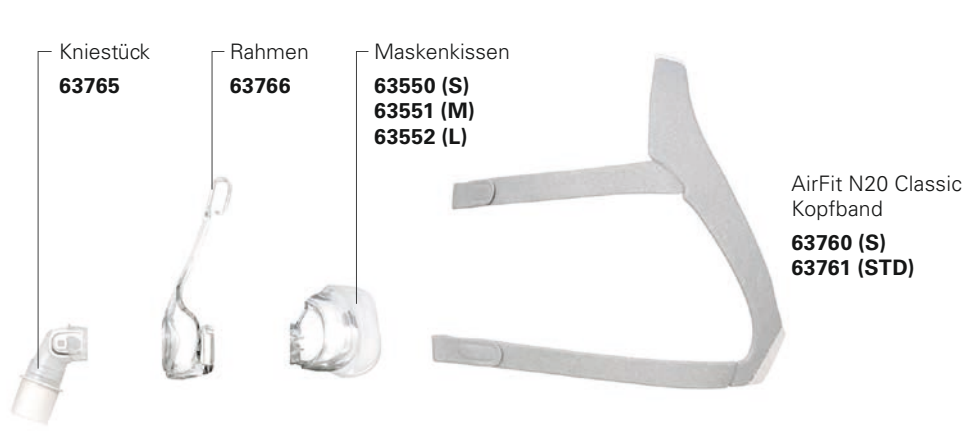

AirFit N20 Classic Kopfband  
63760 (S)  
63761 (STD)