



DreamWisp

Nasenmaske mit minimaler Kontaktfläche

DreamWisp. Für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit.

Erleben Sie einen neuen Schlafkomfort! Durch die Kombination des revolutionären DreamWear Designs – der ersten Maske auf dem Markt mit einem Schlauchanschluss am Kopf – und der hervorragenden Abdichtung des Wisp Nasenkissens mit minimaler Kontaktfläche sowie zusätzlicher Stabilität durch das 4-Punkt-Kopfband entsteht eine vollkommen neue Bewegungsfreiheit!

- Durch den Schlauchanschluss auf dem Kopf können Patienten wieder die für sie angenehmste Schlafposition einnehmen, egal ob sie am liebsten auf dem Bauch, Rücken oder auf der Seite liegen.
- Der Luftstrom wird durch den Rahmen geleitet – ganz ohne den störenden Schlauch vorne am Maskenkissen. Auch wenn der Patient auf der Seite liegt ist die Luftzufuhr immer sichergestellt.
- Das Nasenkissen umschließt die Nase sanft mit einer minimalen Kontaktfläche, die Abdrücke verringert und eine gute Abdichtung sicherstellt.
- Das 4-Punkt-Kopfband sorgt für mehr Stabilität und Tragekomfort und hält das Maskenkissen in jeder Schlafposition sicher an seinem Platz.



Anleitung zur Maskenanpassung

Befolgen Sie die Schritte in der Anleitung, um die DreamWisp Nasenmaske anzupassen.

	1 Wählen Sie das Maskenkissen aus, das zur Nasenbreite passt ohne die Nasenlöcher zu blockieren. Der obere Kissenrand sollte zwischen dem Nasenrücken und der Nasenspitze sitzen. Es sind fünf Kissen Größen verfügbar: Petite, Small, Medium, Large, Extra Large.
	2 Lösen Sie einen oder beide Magnetclips von ihren magnetischen Gegenstücken.
	3 Halten Sie das Maskenkissen auf der Nase und ziehen Sie das Kopfband über den Kopf.
	4 Positionieren Sie den Rahmen oben mittig auf dem Kopf und ziehen Sie das Kopfband über den Hinterkopf.
	5 Befestigen Sie die Magnetclips an ihren magnetischen Gegenstücken an den unteren Teilen des Kopfbandes.
	6 Um den Sitz der Masken zu justieren, werden zunächst die unteren Laschen des Kopfbandes von den Stoffteilen abgezogen. Passen Sie die Länge der Bänder gleichmäßig an. Zur Befestigung drücken Sie die Laschen wieder an den Stoff an. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den oberen Bändern. Hinweis: Ziehen Sie das Kopfband nicht zu fest an.
	7 Passen Sie die Maske so lange an, bis sie bequem sitzt. Nach Abschluss der Maskeneinstellung sollte das Kniestück auf der Kopfoberseite mittig aufliegen. Das Maskenkissen sollte komfortabel auf Ihrem Gesicht aufliegen, ohne die Nasenlöcher zu blockieren.

Hinweise: Weitere Informationen zum Anpassen entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung. Bitte beachten Sie, dass das Verbindungsstück zur Größenanpassung am Rahmen sowie das Kopfband auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich sind (siehe Zubehör).

Bestellinformationen für den Fachhandel

Maske mit Ausatemventil, Kopfband (Standard) und Rahmenverbindungsstück (Medium)	Artikelnr.
DreamWisp Fitpack mit den Maskenkissen Small, Medium und Large	1137921
DreamWisp Maske, Maskenkissen Größe Petite	1137942
DreamWisp Maske, Maskenkissen Größe Small	1137943
DreamWisp Maske, Maskenkissen Größe Medium	1137944
DreamWisp Maske, Maskenkissen Größe Large	1137945
DreamWisp Maske, Maskenkissen Größe Extra Large	1137946

Ersatzteile und Zubehör



DreamWisp Maskenkissen	Artikelnr.
Größe Petite	1137956
Größe Small	1137957
Größe Medium	1137958
Größe Large	1137959
Größe Extra Large	1137960



DreamWisp Rahmenverbindungsstück	Artikelnr.
Größe Small	1137961
Größe Medium	1137962
Größe Large	1137963



DreamWisp Kopfband	Artikelnr.
Größe Standard	1137964
Größe Groß	1137965
Größe Klein	1137966



DreamWisp	Artikelnr.
Stoffpolster	1137968
Magnetclips	1120434
Anschlussstück und Schnellverschluss	1116748



DreamWisp	Artikelnr.
Rahmen	1137970



DreamWisp	Artikelnr.
Anpassschablone	1137967