

# VOLCANO MEDIC 2

## - Tisch-Cannabisverdampfer -

Als medizinisch zugelassener Tisch-Cannabisverdampfer können mit dem VOLCANO MEDIC 2 sowohl getrocknete Cannabisblüten als auch Cannabinoide aus in Alkohol gelöstem Dronabinol verdampft werden.

Der strombetriebene Tisch-Verdampfer verfügt über eine abnehmbare, große Füllkammer, einem größeren Touch-Display und größere Tasten. Aufgrund der Leistung und der maximalen Größe der Füllkammer, eignet sich das Gerät auch für Patient\*innen, die eine große Menge an Cannabisblüten verdampfen müssen.

### ● Inbetriebnahme

Die Verdampfung kann über zwei Methoden erfolgen: Über einen Ventilballon oder eine Schlaucheinheit.

Bei der Verdampfung über den Ventilballon wird dieser über die eingeschaltete Pumpe mit dem Aerosol befüllt. Der Ventilballon ist abnehmbar, die Inhalation erfolgt direkt über den Ballon. Der Zugwiderstand ist bei dieser Methode gering und somit z.B. auch für schwache Personen geeignet.

Anstelle des Ventilballons kann auch die Schlaucheinheit verwendet werden, die Pumpe wird bei dieser Methode nicht eingeschaltet. Die Inhalation erfolgt über die eigene Lungenkraft des Anwenders.

Die Wirkungsweise und die möglichen Indikationen sind dieselbe wie beim MIGHTY+ MEDIC.



### ● Vorteile auf einen Blick

- Einfache Handhabung - auch bei eingeschränkter Motorik
- Großes, übersichtliches Touch-Display
- Große Tasten zur einfachen Temperatureinstellung (Plus- / Minus-Tasten)
- Inhalation von sowohl getrockneten Cannabisblüten als auch von in Alkohol gelöstem Dronabinol möglich
- Inhalation entweder über Ventilballon oder Schlaucheinheit möglich

### ● Medizinisch anerkannt und verordnungsfähig

- Medizinisches Cannabis ist in Deutschland gemäß dem BtMG (Betäubungsmittelgesetz) verkehrs- und verschreibungsfähig
- Bei entsprechender Indikation kann jeder Haus- und Facharzt somit Cannabisblüten und -extrakte verschreiben
- Nach Genehmigung kann der VOLCANO MEDIC 2 von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen werden

**Wissenschaftliche Studien** mit weiterführenden Informationen finden Sie auf unserer Homepage:

