





OxyHaler - Reinigungsanleitung

- vor Gebrauch bitte komplett lesen -


Schritt 1

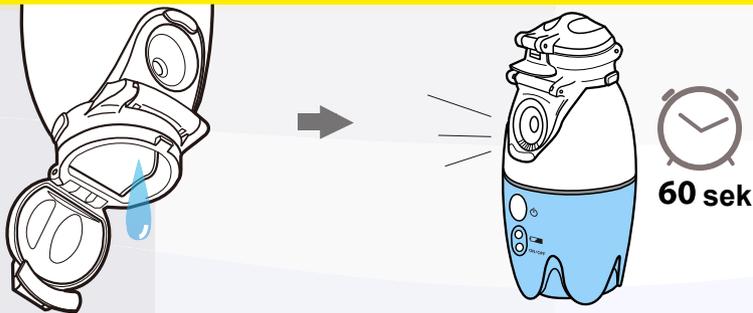

Schritt 2

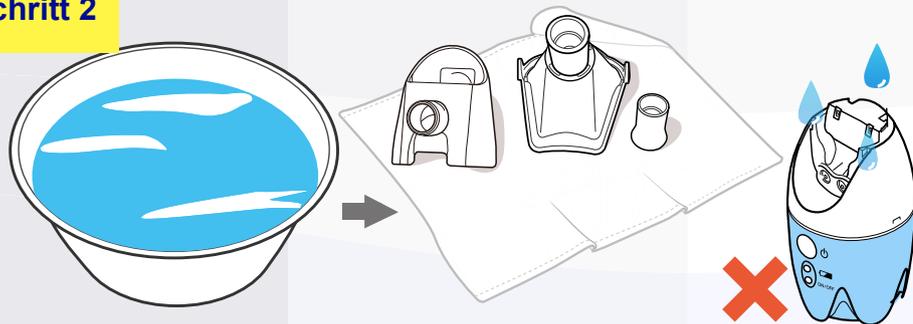

Schritt 3

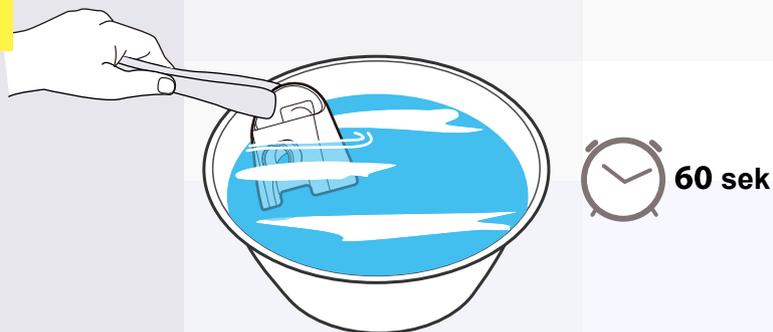

Schritt 4



Schritt 5



Entsorgen Sie ggf. Reste der Verneblerkammer. Füllen Sie die Kammer dann halb voll mit Wasser und schwenken Sie das Gerät danach vorsichtig. Schalten Sie nun den OxyHaler für 60 Sek. ein, um das Wasser zu vernebeln (warmes Wasser eignet sich am besten).

Achtung

Verwenden Sie zum Reinigen der Maske niemals Desinfektionsmittel, einschließlich Hypochloridlösungen. Versuchen Sie niemals die metallische Membran mit einem Tuch oder "Wattestäbchen" zu reinigen. Dies würde die Membran irreparabel beschädigen.

Waschen Sie das Zubehör vorsichtig mit sauberem, warmen Wasser und trocknen Sie es danach vollständig.

Achtung

Trocknen Sie das Zubehör niemals in einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Sterilisator für Säuglingsflaschen oder Ähnlichem. Halten Sie das Grundgerät von Wasser fern.

Desinfizieren Sie die Maske, das Mundstück und deren Anschlussstück indem Sie diese Teile für 1 Minute in heißes Wasser legen. Trocknen Sie die Teile danach vollständig ab.

Achtung

Legen Sie Bestandteile des Zerstäubers vor dem ersten Gebrauch in kochendes Wasser, jedoch max. 1 Minute. Berühren Sie die Maske nicht mit einer Pinzette. Im weiteren Gebrauch können Sie alle Teile in kochendem Wasser desinfizieren, jedoch max. 1 Minute.

Wenn Sie das Gerät befüllt haben, nutzen Sie es umgehend! (Sollte das befüllte Gerät länger als 10 Minuten nicht genutzt werden könnte die Flüssigkeit auslaufen).

Achtung

Wird das Gerät nicht genutzt, muss die Flüssigkeit entsorgt werden.

Wird das Gerät längere Zeit nicht genutzt, laden Sie die Batterien vollständig auf und entnehmen Sie diese aus dem Gerät. Lagern Sie das Gerät und die Batterien separat und trocken.

Achtung

Achten Sie beim Wiedereinsetzen der Batterien auf die korrekte Polung.