

**Bitte vor dem ersten Gebrauch sorgfältig lesen!**

Prüfen Sie, ob sich im RC-Animal Chamber Fremdkörper befinden, Teile beschädigt sind oder fehlen.

Vor dem ersten Gebrauch und anschließend mindestens wöchentlich den RC-Animal Chamber entsprechend der Anleitung reinigen.

Das Gerät bitte nur für ein Tier verwenden!

**Tipp:** Wir empfehlen Ihnen die Anwendung vor Fütterung!

**Verwendungszweck**

Der RC-Animal Chamber ist eine Inhalationshilfe, die speziell für die Therapie mit Medikamentensprays – so genannte Dosieraerosole – entwickelt wurde und zur Behandlung von Atemwegserkrankungen bei Tieren eingesetzt wird. Der flexible Universaladapter ermöglicht eine Therapie mit allen gängigen Dosieraerosolen.


Mit Hilfe des RC-Animal Chamber :

- wird eine Anwendung mittels Dosieraerosols erst ermöglicht
- werden die Nebenwirkungen im Gegensatz zu herkömmlichen Therapien (z.B. bei Tablettengabe oder Injektion) vermindert


Verwendung nach tierärztlicher Anweisung!

**Die Packung enthält den RC-Animal Chamber bestehend aus:**

1. Aufsatzstück für die Maske
2. Ventil & Einatemkontrolle
3. Aerosol-Aufnahmekammer
4. Universaladapter für Dosieraerosole (abnehmbar)
5. Zudem enthalten die Artikel:
  - RC-Animal Chamber Katze 2 Masken (XS, S)
  - RC-Animal Chamber Hund 3 Masken (XS, S, M)
  - RC-Animal Chamber Pferd 1 Maske (L)

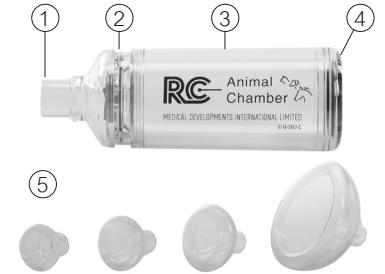


**Katze** Anwendung RC-Animal Chamber Katze (mit 2 Masken „XS“, „S“)
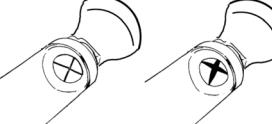
<p><b>1</b></p>  <p>1. Entfernen Sie die Verschlusskappe vom Mundstück des Dosieraerosols und schütteln Sie das Dosieraerosol vor jedem Gebrauch kräftig.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>2. Stecken Sie das Mundstück des Dosieraerosols in den Universaladapter. Stellen Sie sicher, dass die Maske richtig fest auf dem RC-Animal Chamber sitzt.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>3. Setzen Sie die Maske behutsam auf die Schnauze. Achten Sie bitte darauf, dass die Maske dicht abschließt.</p> <p>Siehe Anwenderbild auf der Rückseite.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>4. Drücken Sie die Kartusche des Dosieraerosols nach unten, um einen Sprühstoß in die Kammer des RC-Animal Chamber abzugeben. Sollte das Tier sehr ängstlich sein, fragen Sie bitte Ihren Tierarzt um Rat.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>5. Die Atemzüge sind an den Ventilbewegungen ablesbar. Halten Sie den RC-Animal Chamber für vier bis sechs Atemzüge auf die Schnauze.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>6. Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, sollte eine Minute vergehen, ehe die Schritte 3 bis 5 wiederholt werden!</p> <p>Tipp: Belohnen Sie Ihr Tier!</p>
--	--	---	---	--	---


- Hinweise:**
- Benutzen Sie bitte die Maske, die einen Verschluss der Schnauze sicherstellt. Stecken Sie die ausgesuchte Maske so auf, dass sie mit der Kammer abschließt und fest sitzt.
  - Um das Tier an den RC-Animal Chamber zu gewöhnen, ist es sinnvoll, das Dosieraerosol in die Kammer zu sprühen, bevor Sie die Maske auf die Schnauze aufsetzen.
  - Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, geben Sie immer nur einen Sprühstoß pro Inhalationsvorgang in die Kammer! Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Dosieraerosols, sowie die Anweisungen des Tierarztes.

**Hund** Anwendung RC-Animal Chamber Hund (mit 3 Masken „XS“, „S“, „M“)
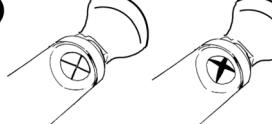
<p><b>1</b></p>  <p>1. Entfernen Sie die Verschlusskappe vom Mundstück des Dosieraerosols und schütteln Sie das Dosieraerosol vor jedem Gebrauch kräftig.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>2. Stecken Sie das Mundstück des Dosieraerosols in den Universaladapter. Stellen Sie sicher, dass die Maske richtig fest auf dem RC-Animal Chamber sitzt.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>3. Setzen Sie die Maske behutsam auf die Schnauze. Achten Sie bitte darauf, dass die Maske dicht abschließt.</p> <p>Siehe Anwenderbild auf der Rückseite.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>4. Drücken Sie die Kartusche des Dosieraerosols nach unten, um einen Sprühstoß in die Kammer des RC-Animal Chamber abzugeben. Sollte das Tier sehr ängstlich sein, fragen Sie bitte Ihren Tierarzt um Rat.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>5. Die Atemzüge sind an den Ventilbewegungen ablesbar. Halten Sie den RC-Animal Chamber für vier bis sechs Atemzüge auf die Schnauze.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>6. Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, sollte eine Minute vergehen, ehe die Schritte 3 bis 5 wiederholt werden!</p> <p>Tipp: Belohnen Sie Ihr Tier!</p>
--	--	---	---	--	---

- Hinweise:**
- Benutzen Sie bitte die Maske, die einen Verschluss der Schnauze sicherstellt. Stecken Sie die ausgesuchte Maske so auf, dass sie mit der Kammer abschließt und fest sitzt.
  - Um das Tier an den RC-Animal Chamber zu gewöhnen, ist es sinnvoll, das Dosieraerosol in die Kammer zu sprühen, bevor Sie die Maske auf die Schnauze aufsetzen.
  - Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, geben Sie immer nur einen Sprühstoß pro Inhalationsvorgang in die Kammer! Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Dosieraerosols, sowie die Anweisungen des Tierarztes.

**Pferd** Anwendung RC-Animal Chamber Pferd (mit Masken „L“)

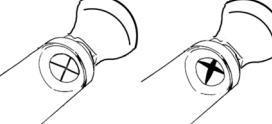
<p><b>1</b></p>  <p>1. Entfernen Sie die Verschlusskappe vom Mundstück des Dosieraerosols und schütteln Sie das Dosieraerosol vor jedem Gebrauch kräftig.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>2. Stecken Sie das Mundstück des Dosieraerosols in den Universaladapter. Stellen Sie sicher, dass die Maske richtig fest auf dem RC-Animal Chamber sitzt.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>3. Setzen Sie die Maske behutsam auf eine der Nüstern. Achten Sie bitte darauf, dass die Maske dicht abschließt.</p> <p>Siehe Anwenderbild auf der Rückseite.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>4. Drücken Sie die Kartusche des Dosieraerosols nach unten, um einen Sprühstoß in die Kammer des RC-Animal Chamber abzugeben. Sollte das Tier sehr ängstlich sein, fragen Sie bitte Ihren Tierarzt um Rat.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>5. Die Atemzüge sind an den Ventilbewegungen ablesbar. Halten Sie den RC-Animal Chamber für vier bis sechs Atemzüge auf die Nüstern.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>6. Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, sollte eine Minute vergehen, ehe die Schritte 3 bis 5 wiederholt werden!</p> <p>Tipp: Belohnen Sie Ihr Tier!</p>
--	--	---	---	---	---

- Hinweise:**
- Stecken Sie die Maske so auf, dass diese mit der Kammer abschließt und fest sitzt. Die Maske mit der Kammer und dem Dosieraerosol so auf eine der Nüstern setzen, dass diese vollständig umschlossen wird.
  - Um das Tier an den RC-Animal Chamber zu gewöhnen, ist es sinnvoll, das Dosieraerosol in die Kammer zu sprühen, bevor Sie die Maske auf eine der Nüstern aufsetzen.
  - Hat der Tierarzt mehrere Sprühstöße verordnet, geben Sie immer nur einen Sprühstoß pro Inhalationsvorgang in die Kammer! Beachten Sie die Gebrauchsanleitung des Dosieraerosols, sowie die Anweisungen des Tierarztes.

Reinigung und Desinfektion RC-Animal Chamber




1. Ziehen Sie die Maske ab.

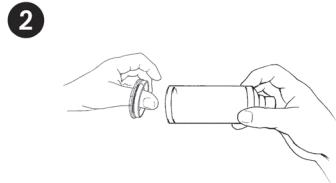


2. Nehmen Sie den Universaladapter ab, indem Sie den Daumen in die Öffnung stecken. Ziehen Sie mit Kraft das komplette Rückteil heraus.



3. **Reinigung:** alle Einzelteile in lauwarmes Spülmittelwasser einlegen und anschließend unter fließend warmem Wasser abspülen.  
**Zur Desinfektion** legen Sie alle Einzelteile für ca. 5 Minuten in kochendes Wasser. Bitte einen sauberen Topf mit ausreichend frischem Trinkwasser verwenden.

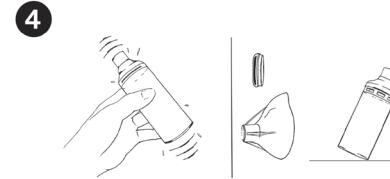

4. Schütteln Sie das überschüssige Wasser ab und lassen Sie alle Teile offen an der Luft vollständig trocknen.  
  
Nicht trocken reiben!

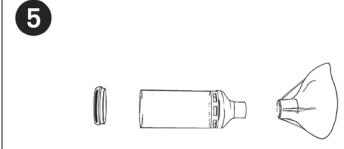

5. Nach dem vollständigen Trocknen fügen Sie alle Teile wieder zusammen.

**Hinweise:**

- Bei regelmäßiger Anwendung reinigen Sie das Gerät einmal pro Woche, bei Bedarf auch mehrmals.
- Kinder und Tiere nicht unbeaufsichtigt mit dem RC-Animal Chamber spielen lassen.
- Tauschen Sie bei täglicher Anwendung den RC-Animal Chamber spätestens nach einem Jahr aus.
- Alle Materialien sind latexfrei.
- Masken sind einzeln erhältlich.
- Heben Sie die Gebrauchsanweisung auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Um Kalkablagerungen zu vermeiden empfehlen wir das Auskochen in destilliertem Wasser.
- Alle Teile des RC-Animal Chamber sind auskochbar, im Vaporisator zu desinfizieren, sowie in der Spülmaschine und im RC-Clean® Reinigungsbeutel zu reinigen.

RC-Animal Chamber – die Inhalierhilfe für Katzen, Hunde und Pferde

RC-Animal Chamber für Kitten und ausgewachsene Katzen



Artikel-Nr. 2020

RC-Animal Chamber für kleine, mittelgroße und große Hunde



Artikel-Nr. 2030

RC-Animal Chamber für Pferde



Artikel-Nr. 2040

RC-Clean® Reinigungsbeutel für die Mikrowelle

Einfache, sichere und schnelle Reinigung von mikrowelleneigneten Medizinprodukten.

Artikel-Nr. 5000  
PZN 10 751 032



Anwenderbild Katze



Anwenderbild Hund



Anwenderbild Pferd



Alleinvertrieb Deutschland, Österreich und Schweiz sowie Hersteller Masken

Hersteller