

Gebrauchsanweisung für Cluster-Kopfschmerz-Systeme



Zur Verwendung des Systems gehen Sie wie folgt vor:

1. Therapie:

Der Patient erhält eine Behandlung mit 100% Sauerstoff. Hierzu wird eine Maske mit einem Reservoirbeutel und ein T-Stück mit zwei Rückschlagventilen verwendet. Die Rückschlagventile dienen dazu, dass der Patient nur aus dem Reservoirbeutel atmen kann und keinerlei Raumluft geatmet werden kann.

2. Verwendung:

- 2.1. Packen Sie die beiliegende Maske aus und stecken Sie die Maske auf das T-Stück. Wählen Sie hierzu die entgegengesetzte Seite der Pfeilmarkierung des T-Stücks (siehe Anschluss A).
- 2.2. Stecken Sie den Sauerstoffsicherheitsschlauch auf den vorgesehenen Anschluss (B) fest auf.
- 2.3. Verbinden Sie die andere Seite des Sauerstoffsicherheitsschlauchs mit Ihrer Sauerstoffquelle.
- 2.4. Stellen Sie Ihr Flowmeter so ein, dass einen Flussrate von 7 bis 15 l/min gewährleistet wird.
- 2.5. Bezüglich der Dauer der Therapie befragen Sie bitte Ihren behandelnden Arzt.